

## **Cuidado de los lentes de naturaleza orgánica CR-39-POLIURETANO (Thin & Lite) y otros materiales**

**Es importante instruir al usuario** sobre la conservación y cuidado de sus lentes de naturaleza orgánica. La información básica que se debe proporcionar es: -Limpiar los lentes, al menos dos veces al día, usando agua y un jabón suave. Secarlos suavemente con un pañuelo facial de calidad. Si se utiliza algún líquido limpiador de lentes, de los que están disponibles en el mercado, tener presente que no se debe aplicar directamente sobre los lentes sin antes éstos enjuagarse para retirar las partículas extrañas de su superficie. **Es inadecuado la limpieza en seco.** Esta debe evitarse y no debe usarse ningún tipo de paño o tela si se desea mantener los lentes libres de rayas.

Recomendamos tener presente que el material **Poliuretano**, resina básica del lente **T&L**, requiere de un exigente cuidado, ya que hemos comprobado que es más fácil de dañarse que un lente CR-39 normal, por lo que se aconseja cumplir con todas las medidas de precaución en su manejo, y a su vez advertir al usuario sobre los cuidados necesarios para conservar el lente.

El usuario y la educación que éste adquiera en el manejo de sus anteojos son la mejor **PROTECCION DE LOS LENTES.**